





1 Tarvittavat välineet: steriili lansetti, jossa noin 2,0 mm kärki, steriiliä alkoholivalmistetta, steriiliä sideharsoa, pehmeä kangas, verinäytelomake, käsineet.

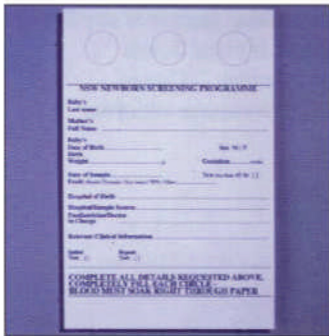


2 Täytä **KAIKKI** pyydetyt tiedot. Varmista, ettei imupaperi vahingoitu kosketuksesta tai joudu kosketuksiin lian kanssa ennen tai jälkeen näytteenottoa. Säilytä 'submitter copy' (näytteenottajan kopio) jos saatavilla.

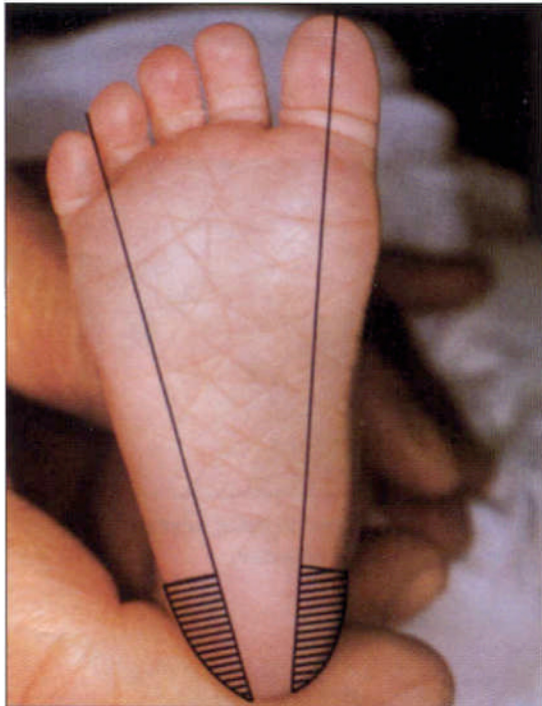


3 Varjostettu alue osoittaa turvallisen pistosalueen.




4 Lämmitä pistoskohtaa kolmesta viiteen minuuttia pehmeällä kankaalla, joka on kostutettu lämpimällä vedellä (max. 41 °C).

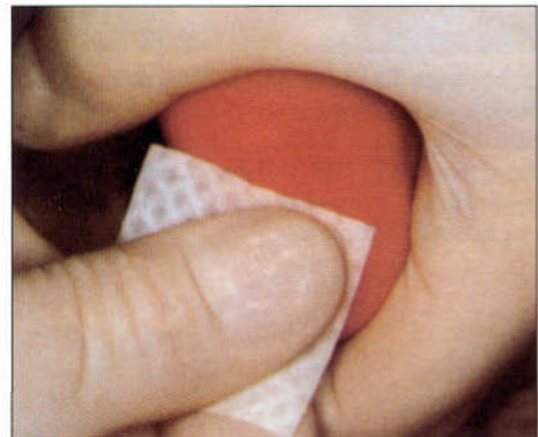

5 Puhdista pistosalue alkoholilla. **KUIVAA** alue steriilillä sideharsolla.

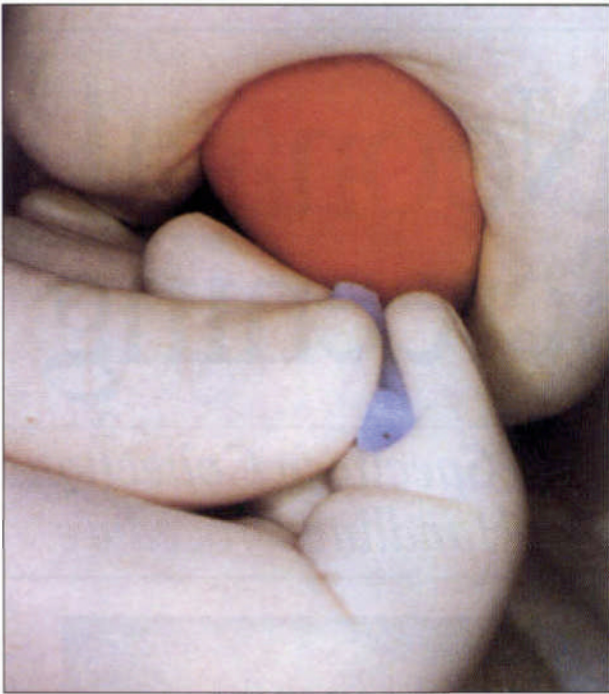


6 Tee pistos kantapäähän. Pyyhi pois ensimmäinen veripisara steriilillä sideharsolla. Anna uuden ISON veripisaran muodostua.

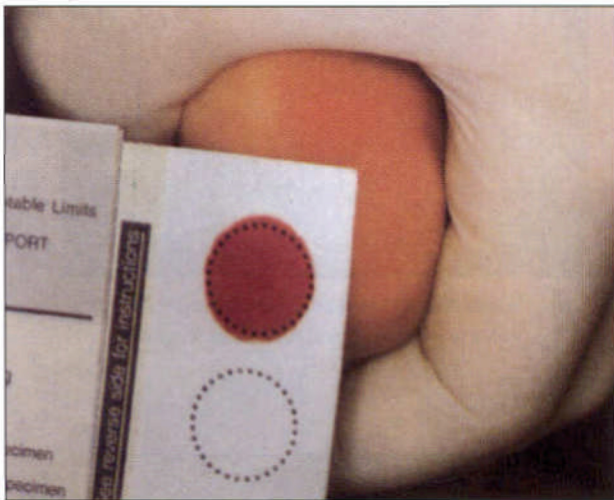

7 Kosketa ISOA veripisaraa kevyesti imupaperilla. Anna veren imeytyä imupaperin läpi ja niin, että se täyttää koko merkityn näyteympyrän alueen yhdellä kosketuksella. (Veren tulon parantamiseksi voi pistoskohdan ympäristöä puristaa HYVIN HELLÄVARAISESTI.) Imeytä verta imupaperiin vain paperin yhdeltä puolelta.



8 Täytä muut näyteympyrät kuin kohdassa 7 riittäväillä veritipoilla. Jos veren tulo vähenee, toista kohdat 5-7. Pistosalueesta huolehtiminen tulee olla yhdenmukainen sairaalan omien toimintatapojen kanssa.

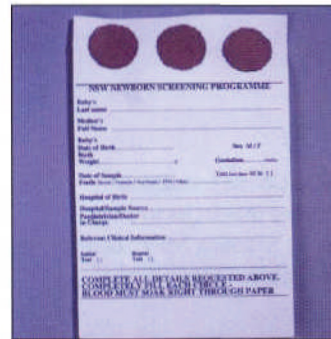

9 Anna näytteiden kuivua kuivalla, puhtaalla, ei-imukykyisellä alustalla vähintään neljä tuntia.



10 Postita täytetty lomake testilaboratorioon 24 tunnin sisällä näytteen otosta.